

GPS-paikannin muistisairaalle, käyttöohje

Malli V51

Malli V51, avaimenperämallinen paikannin SOS-painikkeella. Tämä ohje on kirjoitettu valmistajan englanninkielisen ohjeen pohjalta. Jos jokin jää epäselväksi, soita 041 472 5281 arkisin klo 10 to 16 tai kirjoita info@seniorituki.fi.

Sisällys

1. Pakkauksen sisältö
2. Mitä tarvitset lisäksi
3. Käyttöönotto vaihe vaiheelta
4. Päivittäinen käyttö
5. Muut toiminnot sovelluksessa
6. Sammutus ja nollaus
7. Ongelmatilanteet
8. Tekniset tiedot
9. Tärkeää

Pakkauksen sisältö

Paikannin, kaulanauha, magneettinen USB-latauskaapeli, pieni ruuvimeisseli ja valmistajan englanninkielinen ohje.

Mitä tarvitset lisäksi

Nano-SIM-kortin jossa on dataliittymä ja puhelu oikeus. Kortti ei tule mukana. Suosittelemme liittymää joka ei vanhene, esimerkiksi Elisan Laitenetti tai DNA:n tai Telian vastaava laiteliittymä. Prepaid toimii, mutta se pitää muistaa ladata.

Poista kortin PIN-koodin kysely ennen asennusta tavallisella puhelimella: laita kortti puhelimeen, avaa asetukset, SIM-kortin lukitus, ota PIN-kysely pois. Paikantimessa ei ole

näppäimistöä.

Käyttöönotto vaihe vaiheelta

- 1** Lataa paikannin täyteen ennen ensimmäistä käyttöä, noin 3 tuntia. Magneettikaapeli tarttuu laitteen takana oleviin latauskohtiin. Punainen valo vilkkuu latauksen aikana ja palaa jatkuvasti kun akku on täynnä.
- 2** Varmista että paikannin on sammutettuna. Avaa SIM-luukku ruuvimeisselillä. Työnnä nano-SIM paikalleen siru ylöspäin ja lovi sisäänpäin, kunnes se lukittuu. Sulje luukku ja kiristä ruuvit, muuten vesitiiviys kärsii.
- 3** Käynnistä painamalla SOS-painiketta 5 to 7 sekuntia, kunnes laite soittaa äänen ja sininen ja punainen valo syttyvät hetkeksi.
- 4** Odota verkkoa ja paikannusta. Punainen valo vilkkuu hitaasti kun laite etsii verkkoa ja nopeasti kun verkko on löytynyt. Sininen valo vilkkuu hitaasti kun se paikantaa ja nopeasti kun sijainti on lähetetty. Ensimmäinen paikannus onnistuu parhaiten ulkona ja kestää noin puoli minuuttia.
- 5** Lataa puhelimeesi sovellus AnyTracking (App Store tai Google Play). Kirjaudu: valitse "Device ID", syötä laitteen takana olevasta tarrasta 10-numeroinen tunnus, salasana 123456. Vaihda salasana heti asetuksista. Sama tunnus toimii myös selaimessa osoitteessa www.gps123.org.
- 6** Kun sovellus näyttää laitteen tilaksi "Stationary" tai "Moving", se on yhteydessä. Vasta silloin asetuksia voi tehdä.
- 7** Aseta SOS-numerot: Settings, Set SOS number. Enintään kolme numeroa muodossa +358401234567. SOS-painallus soittaa näihin järjestyksessä kunnes joku vastaa.
- 8** Aseta pikanumerot: painikkeet 1 ja 2 laitteen etupuolella soittavat kahteen ensimmäiseen numeroon yhdellä painalluksella.
- 9** Aseta paikannusväli: pääsivun oikea yläkulma, "interval for uploading". Suosittelemme 10 minuuttia: akku kestää silloin 7 to 9 päivää ja sijainti on riittävän tuore. Yhden minuutin väli on tarkin mutta syö akun päivässä.
- 10** Aseta turva-alue: Geo-fence, GPS-fence. Piirrä kartalle koti ja lähialue. Kun paikannin poistuu alueelta tai palaa, puhelimeesi tulee ilmoitus ilman että kenenkään täytyy painaa mitään. Valmistaja suosittelee vähintään 300 metrin sädettä turhien hälytysten välttämiseksi.

- 11 Aseta vastaustapa: Settings, Answer mode. "Auto-answer" avaa puhelun automaattisesti kahden soittoäänen jälkeen kun soittaja on SOS-numeroissa. Tämä on paras valinta muistisairaalle. "Push to answer" vaatii painikkeen 1 tai 2 painalluksen.
- 12 Kytke Safe mode päälle: Settings, Safe mode. Silloin laitteeseen voi soittaa vain SOS-numeroista.
- 13 Kirjoita laitteen puhelinnumero sovellukseen: Settings, About the device, Device phone number. Ilman tätä sovelluksen "Call to Tracker" -painike ei toimi.

Päivittäinen käyttö

Hätäkutsu. Paina SOS-painiketta pitkään. Laite soittaa SOS-numeroihin järjestyksessä. Puhe kuuluu laitteen kaiuttimesta ja mikrofonista.

Soitto laitteeseen. Soita SIM-kortin numeroon tai paina sovelluksessa "Call to Tracker". Safe mode päällä vain tallennetut numerot pääsevät läpi.

Puhelun lopetus tai hylkäys. Paina SOS-painiketta.

Kellonajan kuuntelu. Lyhyt painallus SOS-painikkeesta kertoo kellonajan ääneen, kun Talking clock on päällä asetuksista.

Kuuntelu. Voice monitoring avaa yksisuuntaisen yhteyden, jolla kuulet laitteen ympäristön äänet. Käytä vain hätätilanteessa ja kerro läheiselle että toiminto on olemassa.

Lataus. Lataa kun punainen valo vilkkuu hitaasti yksin, käytännössä kerran viikossa 10 minuutin paikannusvälillä. Kannattaa ladata aina samana viikonpäivänä.

Kanto. Kaulanauhassa, avaimenperässä tai takin taskussa. Paikannin toimii parhaiten kun se ei ole metallikotelon tai laukun pohjalla.

Muut toiminnot sovelluksessa

Historia. Historical route näyttää liikkeet 90 päivän ajalta. Voit suodattaa pois epätarkat sisätilapaikannukset.

WiFi-turva-alue. Kaksi kotiverkkoa voi asettaa turva-alueeksi. Toimii vain 2,4 GHz -verkoissa.

Kaatumishälytys. Fall down alarm kytkee liikeanturin päälle. Herkkyys 0 to 5, jossa 0 on herkin. Aloita tasolta 3. Valmistaja toteaa itse, että tunnistus tuottaa vääriä hälytyksiä ja on tarkoitettu tueksi. Hidas lysähtäminen voi jäädä huomaamatta. SOS-painike on aina ensisijainen tapa hälyttää apua.

Lääkemuistutus. Pill alarm. Laite soittaa äänen muistutusaikoina.

Herätys. Clock alarm, kolme herätystä.

Askelmittari. Health Step.

Hälytystapa. Scene mode: ääni, värinä, molemmat tai ei mitään.

Tekstiviestihälytykset. SMS alert switch lähettää hälytykset myös tekstiviestinä pääkäyttäjän numeroon (Main monitoring number). Hyvä varmistus jos sovelluksen ilmoitukset eivät tule.

Etsi laite. Find device soittaa laitteesta äänen.

Kieli ja aikavyöhyke. Aikavyöhyke asettuu yleensä automaattisesti SIM-kortin perusteella. Jos aika on väärin, aseta +2 (kesäaika +3).

Sammutus ja nollaus

Kun SIM-kortti on paikallaan, laitetta ei voi sammuttaa painikkeesta, jotta se ei sammu vahingossa. Sammutus sovelluksesta: Settings, Remote power-off. Ilman SIM-korttia sammutus onnistuu pitämällä SOS-painiketta pohjassa 5 to 7 sekuntia.

Jos laite jumittuu, paina lyhyesti RST-reikää neulalla, lataa hetki ja käynnistä uudelleen. Älä paina reikää pitkään.

Ongelmatilanteet

Sovellus näyttää "Not enabled". SIM-kortilla ei ole dataliittymää tai APN puuttuu. Lähetä omasta puhelimestasi tekstiviesti laitteen numeroon: `pw,123456,apn,internet,,,24405#` (Elisa). DNA: `pw,123456,apn,internet,,,24412#`. Telia: `pw,123456,apn,internet,,,24491#`. Kaikki pienellä, ei välilyöntejä.

Sovellus näyttää "Offline". Laite ei ole verkossa. Tarkista virta, SIM ja kuuluvuus. Vie ulos tai ikkunan luo.

"Wait for the device responses" asetuksia tehdessä. Laitteen dataliittymä on heikko tai laite on kesken toisen tehtävän. Odota hetki ja yritä uudelleen.

"Device is busy" kun soitat. Numerosi ei ole SOS-numeroissa tai SIM-kortin numeronnäyttö on pois päältä.

Puhelussa vinkuu. Oma puhelimesi on liian lähellä laitetta.

Sijainti heittää sisällä. Sisätiloissa laite käyttää WiFi- tai tukiasemapaikannusta, tarkkuus 15 to 100 metriä tai heikompi. Ulkona GPS-tarkkuus on 5 to 15 metriä. Tämä on normaalia.

Tekniset tiedot

Verkko 4G LTE (taajuuudet 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, toimii kaikissa suomalaisissa verkoissa), 3G ja 2G. Paikannus GPS, Beidou, WiFi ja tukiasema. Akku 1000 mAh, valmiusaika 7 to 9 päivää 10 minuutin paikannusvälillä. Vesitiiviys IP67, kestää sateen ja roiskeet, ei upotusta. Paino 45 g. Koko 57,5 x 40 x 16,5 mm. Käyttölämpötila -20 to +70 astetta.

Tärkeää

Kaikkien GPS-laitteiden sijainnissa on virhettä, ja verkko-operaattorin viive voi hidastaa hälytystä. Paikannin on turvallisuuden lisä, ei korvike yhteydenpidolle. Älä avaa laitteen koteloä, se rikkoo vesitiiviyyden ja takuun. Lataa ja pura akku täyteen vähintään kerran kolmessa kuukaudessa.

Seniorituki.fi, Uusiku Oy. Puhelinneuvonta arkisin klo 10 to 16, 041 472 5281. Ohje päivitetty syyskuussa 2026.

Emme jätä sinua yksin käyttöönoton kanssa. Soita, niin autamme.

041 472 5281

arkisin klo 10–16 · info@seniorituki.fi · seniorituki.fi