

Lukittava lääkeannostelija, käyttöohje

Malli M112

Malli M112. Tämä ohje on kirjoitettu valmistajan englanninkielisen pikaohjeen pohjalta. Jos jokin jää epäselväksi, soita 041 472 5281 arkisin klo 10 to 16 tai kirjoita info@seniorituki.fi.

Sisällys

1. Mikä laite on
2. Pakkauksen sisältö
3. Osat
4. Käyttöönotto vaihe vaiheelta
5. Päivittäinen käyttö
6. Turvallisuus
7. Ongelmatilanteet
8. Tekniset tiedot
9. Tärkeää

Mikä laite on

Pyöreä annostelija jossa on 28 lokeroa, läpinäkyvä lukittava kansi ja hälytys. Kun lääkkeen aika tulee, laite piippaa ja valorengas vilkkuu, kunnes annostelija käännetään ylösalaisin ja lääkkeet putoavat luukusta käteen. Vain sen hetken lokero avautuu, muut pysyvät lukittuina. Se sopii tilanteeseen jossa lääkkeet otetaan väärään aikaan tai kahdesti.

Pakkauksen sisältö

Annostelija, irrotettava lokerotarjotin, 9 annosrengasta, kansilukon avain ja valmistajan englanninkielinen ohje. Paristot (4 x AA) eivät sisälly.

Osat

Kansi, kannen kahva, annosteluluukku, annosikkuna, valorengas, annosrengas, LCD-näyttö, painikkeet A, B ja C, irrotettava tarjotin, kannen lukko, paristoluukku, kaiutin.

Käyttöönotto vaihe vaiheelta

- 1** Käännä annostelija ympäri. Työnnä paristoluukun salpa sivuun ja avaa luukku. Laita neljä AA-paristoa oikein päin, sulje luukku. Näyttö syttyy.
- 2** Avaa kansi: aseta avain laitteen pohjassa olevaan lukkoon ja käännä myötapäivään. Laita annostelija pöydälle, paina kannen kahvaa ja nosta kansi.
- 3** Nosta lokerotarjotin ulos laitteesta. Sen alla on annosrenkaan paikka.
- 4** Valitse annosrengas. Renkaita on yhdeksän, numero kertoo kuinka monta kertaa päivässä lääke otetaan. Jos lääkkeitä otetaan aamulla ja illalla, valitse rengas 2. Aseta rengas tarjottimen keskelle niin että sen kieleke menee loveen.
- 5** Täytä lokerot. Jokainen lokero on yksi annos. Punaisella merkityt lokerot jäävät tyhjiksi, ne eivät ole käytössä valitulla renkaalla. Lokeroon mahtuu useita tabletteja. Täytä vain kuivat lääkkeet, ja täytä vain kun lokerot ovat täysin kuivat.
- 6** Aseta tarjotin takaisin, sulje kansi ja paina kahvaa kunnes kansi lukittuu. Lukitse avaimella kääntämällä vastapäivään ja ota avain pois. Säilytä avain paikassa johon lääkkeen käyttäjä ei pääse.
- 7** Aseta kellonaika (kansi avoinna): pidä painiketta A pohjassa noin 3 sekuntia kunnes kaksoispiste lakkaa vilkkumasta. Sääda tunnit painikkeella B ja minuutit painikkeella C. Pitkä painallus nopeuttaa. Vahvasta painikkeella A.
- 8** Aseta hälytysajat: paina A kerran, näyttöön tulee kellon kuva ja numero 1. Sääda tunnit B:llä ja minuutit C:llä, vahvasta A:lla. Näyttöön tulee numero 2, aseta seuraava aika samalla tavalla. Aseta yhtä monta hälytystä kuin annosrenkaassa on numero. Loput hälytykset ohitetaan painamalla B kunnes näytössä lukee "-- : --" ja vahvistamalla A:lla. Kuudennen jälkeen näyttö palaa kellotilaan.
- 9** Valitse 24 tunnin näyttö: kellotilassa paina C, kunnes näytössä näkyy 12H tai 24H. Vaihda B:llä, vahvasta A:lla.

Aseta äänenvoimakkuus: kellotilassa paina C, kunnes näytössä näkyy äänenvoimakkuuden numero. B vaihtaa: 0 on äänetön, 1 hiljainen, 2 kova. Vahvasta A:lla. Suosittelemme tasoa 2, jos käyttäjän kuulo on heikentynyt.

Päivittäinen käyttö

Kun hälytys soi. Laite piippaa 7 sekunnin välein ja valorengas vilkkuu enintään 30 minuuttia. Ota annostelija käteen, käännä se ylösalaisin luukku alaspäin niin että lääkkeet putoavat käteen tai kuppiin. Hälytys ja valo sammuvat. Kun laite käännetään takaisin, seuraava lokero siirtyy paikalleen.

Jos hälytys jää huomaamatta. 30 minuutin jälkeen ääni lakkaa, mutta annos pysyy luukun kohdalla seuraavaan hälytykseen asti. Se voidaan ottaa milloin tahansa kääntämällä laite.

Täyttö. Kun lokerot loppuvat, avaa kansi avaimella, nosta tarjotin, täytä ja lukitse. Jos annosrengas ei vaihdu, aikoja ei tarvitse asettaa uudelleen.

Paristot. Näytön oikeaan yläkulmaan tulee paristokuvake kun virta on vähissä. Vaihda paristot heti, älä sekoita vanhoja ja uusia. Asetukset säilyvät jos vaihto tehdään ripeästi.

Virransäätö. Näyttö sammuu muutaman minuutin käyttämättömyyden jälkeen. Se herää kun laitetta kosketetaan tai siirretään.

Turvallisuus

Pidä laite tasaisella alustalla, älä käännä sitä ylösalaisin muulloin kuin annosta otettaessa. Älä kastele laitetta, älä laita sitä kylpyhuoneeseen. Älä pudota. Älä pakota lukkoa. Pidä avain ja paristot lasten ulottumattomissa. Laite ei ole leikkikalu.

Ongelmatilanteet

Näyttö on pimeä. Kosketa laitetta. Jos ei herää, vaihda paristot.

Hälytys ei soi. Tarkista että äänenvoimakkuus ei ole 0 ja että hälytysaika on asetettu (ei "-- : --").

Lääkkeet eivät putoa. Käännä laite kokonaan ylösalaisin luukku suoraan alaspäin. Jos tabletti on jumissa, avaa kansi avaimella ja irrota se käsin.

Väärä lokero avautuu. Tarkista annosrengas ja että lokerot on täytetty renkaan mukaisessa järjestyksessä.

Kansi ei aukea. Avain käännetään myötöpäivään, ja kannen kahvaa painetaan samalla kun kansi nostetaan.

Tekniset tiedot

28 lokeroa, 9 annosrengasta (1 to 9 kertaa päivässä). Hälytys äänellä ja valolla, kesto enintään 30 minuuttia. Virta 4 x AA-paristo. Kansilukko avaimella. Valmistaja Shenzhen Lumiwell Lighting Co., Ltd, Shenzhen, Kiina.

Tärkeää

Annostelija on muistin apuväline, ei lääkinnällinen laite. Lääkkeiden annostuksesta ja ajoituksesta päättää lääkäri tai apteekki. Jos annos jää ottamatta, älä ota kahta seuraavalla kerralla, vaan kysy apteekista.

Seniorituki.fi, Uusiku Oy. Puhelinneuvonta arkisin klo 10 to 16, 041 472 5281. Ohje päivitetty syyskuussa 2026.

Emme jätä sinua yksin käyttöönoton kanssa. Soita, niin autamme.

041 472 5281

arkisin klo 10–16 · info@seniorituki.fi · seniorituki.fi