

Suurennuslasi valolla, käyttöohje

Käsisuurennuslasi, jossa on 80 mm linssi ja 12 LED-valoa. Tämä ohje on kirjoitettu valmistajan englanninkielisen ohjeen pohjalta. Jos jokin jää epäselväksi, soita 041 472 5281 tai kirjoita info@seniorituki.fi.

Sisällys

1. Mikä laite on
2. Pakkauksen sisältö
3. Käyttöönotto
4. Käyttö
5. Puhdistus
6. Turvallisuus
7. Tekniset tiedot
8. Ongelmatilanteet

Mikä laite on

Käsissä pidettävä suurennuslasi, jonka linssin takana on rengasmaisen LED-valo. Sopii lukemiseen, karttojen katseluun ja pienten yksityiskohtien tarkasteluun myös hämärässä.

Pakkauksen sisältö

Suurennuslasi. Paristot (2 x AA) eivät sisälly.

Käyttöönotto

- 1 Avaa kahvan paristokotelo.
- 2 Aseta kaksi AA-paristoa merkintöjen mukaan oikein päin.

- 3 Sulje paristokotelo.

Käyttö

- 1 Suurennus: pidä suurennuslasia kohteen yläpuolella ja siirrä sitä lähemmäs tai kauemmas, kunnes kuva on terävä.
- 2 Valon sytyttäminen: työnnä kahvan päällä olevaa liukukytkintä eteenpäin, jolloin LED-valorengas syttyy.
- 3 Valon sammuttaminen: palauta kytkin alkuasentoon käytön jälkeen, niin paristot säästyvät.

Puhdistus

Pyyhi linssi varovasti pehmeällä mikrokuituliinalla. Älä käytä alkoholia, bensiiniä tai muita kemiallisia nesteitä.

Turvallisuus

- Älä koskaan katso suurennuslasilla aurinkoon tai voimakkaaseen valonlähteeseen. Se voi vaurioittaa silmiä pysyvästi.
- Älä jätä suurennuslasia suoraan auringonvaloon. Linssi keskittää valon ja voi sytyttää tulipalon.
- Poista paristot, jos laite on pitkään käyttämättä.

Tekniset tiedot

Linssin halkaisija 80 mm. 12 valkoista LED-valoa rengasmuodostelmassa. Virtalähde 2 x AA-paristo, eivät sisälly. Paino 270 g. Mitat 205 x 106 x 27 mm. Runko ABS-muovia, kahvassa liukumaton pinta ja liukukytkin.

Ongelmatilanteet

Valo ei syty. Tarkista, että paristot ovat oikein päin ja että ne eivät ole tyhjä.

Kuva on epätarkka. Muuta linssin ja kohteen välistä etäisyyttä hitaasti, kunnes kuva terävöityy.

Linssi on tahriintunut. Pyyhi pehmeällä mikrokuituliinalla ilman pesuaineita.

Seniorituki.fi, Uusiku Oy. Puhelinneuvonta 041 472 5281. Ohje päivitetty syyskuussa 2026.

Emme jätä sinua yksin käyttöönoton kanssa. Soita, niin autamme.

041 472 5281

arkisin klo 10–16 · info@seniorituki.fi · seniorituki.fi