

Tukikahva ruuvikiinnitteinen, asennus- ja käyttöohje

Suora tukikahva ruostumattomasta 304-teräksestä, liukumaton silikoniotte. Tämä ohje on kirjoitettu myyjän tuotetietojen pohjalta. Jos jokin jää epäselväksi, soita 041 472 5281 tai kirjoita info@seniorituki.fi.

Sisällys

1. Mikä tuote on
2. Pakkauksen sisältö
3. Asennus
4. Käyttö
5. Puhdistus
6. Turvallisuus
7. Tekniset tiedot
8. Ongelmatilanteet

Mikä tuote on

Seinään ruuveilla kiinnitettävä suora tukikahva suihkuun, wc-tilaan tai ammeen viereen. Kahvan keskiosassa on liukumaton silikonipinta, jossa on aaltoileva kuviointi ja koholla olevat kohdat otetta varten.

Pakkauksen sisältö

Tukikahva sekä ruuviasennussarja (ruuvit ja seinätulpat).

Asennus

Mukana tulevat ruuvit ja tulpat on tarkoitettu tavalliseen kiinteään seinään. Jos seinä on kevytrakenteinen, käytä seinätyypille sopivia kiinnikkeitä.

- 1 Valitse paikka, jossa kahvaa tarvitaan: esimerkiksi suihkun seinä, wc-istuimen vieressä tai ammeen reunan yläpuolella. Kahva kiinnitetään kantavaan seinään.
- 2 Merkitse kahvan kiinnityslaippojen reikien paikat seinään. Kahvan etäisyys seinästä on 5 cm.
- 3 Poraa reiät ja aseta mukana tulevat seinätulpat.
- 4 Kiinnitä kahva ruuveilla molemmista päistä.
- 5 Laattaseinässä kiinnitys kannattaa tehdä saumojen kohdalle.
- 6 Vedä kahvasta voimakkaasti ennen käyttöä ja varmista, ettei se liiku.

Käyttö

Ota kiinni silikoniotteesta noustessa, istuutuessa ja suihkussa seistessä. Silikonipinta pitää otteen myös märkänä.

Puhdistus

Pyyhi kahva kostealla liinalla ja tavallisella pesuaineella. Ruostumaton teräs kestää kylpyhuoneen kosteutta.

Turvallisuus

- Tarkista kiinnitys säännöllisesti ja kiristä ruuvit, jos kahva liikkuu.
- Kahva on tarkoitettu tukemiseen. Valmistajan ilmoittama kantavuus on noin 227 kg (500 lbs), mutta todellinen kantavuus riippuu seinästä ja kiinnityksestä.
- Älä käytä kahvaa, jos se on irronnut tai vääntynyt.

Tekniset tiedot

Materiaali ruostumaton 304-teräs ja silikonit. Malli suora. Kahvan halkaisija noin 25 mm, silikoniotteen kohdalla noin 32 mm. Etäisyys seinästä 5 cm, kokonaiskorkeus 8 cm. Kantavuus valmistajan mukaan noin 227 kg. Kiinnitys ruuveilla, ruuvit ja tulpat mukana.

Ongelmatilanteet

Kahva liikkuu. Kiristä ruuvit. Jos tulpat pyörivät reiässä, seinä ei kanna: vaihda seinätyypille sopiviin kiinnikkeisiin.

Silikonipinta on liukas. Pese pinta pesuaineella, jotta saippuajäämät irtoavat.

Seniorituki.fi, Uusiku Oy. Puhelinneuvonta 041 472 5281. Ohje päivitetty syyskuussa 2026.

Emme jätä sinua yksin käyttöönoton kanssa. Soita, niin autamme.

041 472 5281

arkisin klo 10–16 · info@seniorituki.fi · seniorituki.fi